

## Gebrauchsinformation

*Spült und erfrischt  
müde, strapazierte Augen.*

Zur besseren Befeuchtung der Augen,  
insbesondere beim Tragen von Kontaktlinsen.

# Herba-Vision® Augenbad *plus*

- Augentrost
- Aloe Vera
- Hyaluronat

200 ml Benetzungslösung für das Auge mit Augentrosttinktur, hergestellt gemäß HAB 2000, Aloe Vera sowie mit natürlichem Hyaluronat.

Herba-Vision® Augenbad plus revitalisiert müde Augen, befeuchtet empfindliche Augen und lindert belastete Augen, die durch Computerarbeit, Umwelteinflüsse oder durch das Tragen von Kontaktlinsen gereizt sind.

Die besondere, natürliche Formulierung mit dem Extrakt aus Augentrost (Euphrasia), Aloe Vera und befeuchtendem Hyaluronat wirkt sanft und wohltuend bei gereizten Augen.

### Zusammensetzung:

Natrium-Hyaluronat, Aloe Vera Gel, Augentrosttinktur, Natriumedetat, Polyhexanid (0,0001 %), Isotonische Lösung gepuffert auf pH 7,20

### Anwendung:

Die Augenbadewanne vor jedem Gebrauch mit der Lösung ausspülen. Die Augenbadewanne mit Herba-Vision® Augenbad plus auffüllen und das Auge darin baden. Die Flasche nach Gebrauch wieder schließen. Die Augenbadewanne nach jedem Gebrauch mit Wasser ausspülen.

Bitte diese Gebrauchsinformation beachten.

### Hinweise:

Vor Anbruch steril. Kühl und lichtgeschützt bei Raumtemperatur lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Von Wärmequellen fernhalten. Nach dem Öffnen zwei Monate haltbar. Nicht nach Überschreiten des Verfalldatums anwenden.

### Vorsichtsmaßnahmen:

Lösung nicht einnehmen. Tropferspitze nicht berühren. Nach Gebrauch verschließen. Immer frische Lösung verwenden. Bei offenen Wunden im oder am Auge nicht anwenden. Nicht verwenden, wenn eine Allergie gegen einen der Inhaltsstoffe besteht. Bei anhaltenden Beschwerden, Augenschmerzen, fortbestehender Reizung und Rötung einen Facharzt/Spezialisten aufsuchen.

**Stand der Information:** Juli 2015

### Vertrieb Deutschland:

#### OmniVision GmbH

Lindberghstraße 9, 82178 Puchheim  
Deutschland

Telefon +49 89 84 07 92-30

Telefax +49 89 84 07 92-40

[www.omnivision.de](http://www.omnivision.de), [info@omnivision.de](mailto:info@omnivision.de)


### Vertrieb Österreich:

#### OmniVision GmbH

Anton Anderer Platz 6

1210 Wien

Österreich

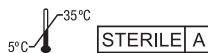

### Hersteller:

Omisan farmaceutici  
via Galilei – Guidonia M. (Rm) Italy



**Herba-Vision® – natürlich mild am Auge.®**



OmniVision GmbH, Lindberghstraße 9, 82178 Puchheim, Deutschland

07.2015